

La société **OXY'PHARM** certifie que le système de désinfection **NOCOTECH** (système couplé des appareils **NOCOSPRAY** ou **NOCOMAX** et du **NOCOLYSE**), par son spectre d'efficacité complet (bactéricide, fongicide, sporicide et virucide) est également efficace sur le **Covid-19**

Le **Covid-19** fait partie de la famille des Coronavirus avec une enveloppe d'ARN. Il est similaire au SRAS, très contagieux et hautement mutant.

Les méthodes de précaution sont les mêmes qu'en 2002 ou 2009: éviter les contacts à main ou les éternuements et désinfecter les surfaces aussi régulièrement que possible.

Le **Covid-19** est sensible au H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, beaucoup plus réactif aux désinfectants que les norovirus, adénovirus ou poliovirus sur lesquels le concept **NOCOTECH** donne d'excellents résultats (études disponibles sur demande).

*Parce que le principe de précaution doit toujours prévaloir, nous recommandons des traitements réguliers de tous les lieux publics ou les lieux de rassemblement. Ainsi, le risque de contamination par les surfaces sera réduit au minimum.*

Si un cas de **Covid-19** est détecté, toutes les surfaces potentiellement infectées doivent être traitées.

## TRAITEMENT CONSEILLÉ

- ▶ **ÉQUIPEMENT** : NOCOSPRAY ou NOCOMAX (pour les gros volumes)
- ▶ **PRODUIT** : NOCOLYSE+ ou NOCOLYSE FOOD (selon les besoins spécifiques)
- ▶ **DOSE** : 3 ml / m<sup>3</sup>: Programmer l'appareil sur le volume de la pièce à traiter
- ▶ **DURÉE DU TRAITEMENT** : Diffusion + 1 heure (Avant réutilisation de la salle, prévoir 1 heure après diffusion)

## GUIDE DE TRAITEMENT DE LA PIÈCE

VOLUME DE LA PIÈCE (m <sup>3</sup> )	10	20	30	40	50	100	200	300
RÉGLAGE POUR LE COVID 19	30	60	90	120	150	300	600	900
DURÉE DE DIFFUSION (minute : seconde)	01:48	03:35	05:20	07:25	09:00	18:00	36:00	57:00
CONSOMMATION (ml)	30	60	90	120	150	300	600	900

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## UTILISATION DE L'APPAREIL

- 1 Brancher le câble d'alimentation du Nocospray 2.  
Mettre l'interrupteur sur I.




- 2 Sélectionner le volume à traiter en faisant glisser le doigt sur la partie claire du clavier. En mode standard, le volume sélectionné par défaut est 10m<sup>3</sup>. La plage de sélection est comprise entre 10m<sup>3</sup> et 1 000m<sup>3</sup>.



- 3 Le pallier est progressif : si deux LEDs sont allumées, la valeur intermédiaire est sélectionnée. Par exemple, si les LEDs 10 et 20 sont allumées, le volume sélectionné est 15 m<sup>3</sup>.



- 4 Pour démarrer, appuyer sur le bouton au centre du clavier (appui long).

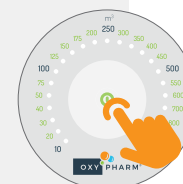

- 5 Un bip retentit pendant 15 secondes avant que la machine ne se mette à fonctionner. Quitter la pièce avant la fin des 15 secondes. À la fin de la diffusion, un bip retentit. L'appareil s'arrête automatiquement.

