



L3 Médical

"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions"

Ascend™ Nasal

Masque Nasal à coussin de gel amovible

Le masque nasal *Ascend™* est un nouveau masque équipé d'un coussin de gel amovible. Grâce à la technologie révolutionnaire *AIR°Gel* développée par la société *SleepNet* le masque nasal *Ascend™* atteint un niveau de confort et de commodité optimum. Le système breveté de coussin gel amovible permet de retirer et de remettre en place celui-ci aisément pour un nettoyage facile ou pour un remplacement. Le masque nasal *Ascend™* est disponible avec fuite intentionnelle en **3 tailles**; S, M, L.

Touchless Spacebar™

Design d'un support frontal éliminant tout contact avec la peau avec une stabilité supérieure.

Coussin amovible

Maintenant, il est possible de remplacer uniquement le coussin de gel. Existe en trois tailles ; S, M, L

AIR°Gel

Un maximum de confort pour un poids minimum, le système breveté AIR°gel réduit les points de pression et les irritations de la peau

Coussin de gel ergonomique

Un coussin ergonomique pour une étanchéité optimale et un ajustement confortable

Fixation Harnais

Le système d'attaches du harnais permet un retrait rapide d'une main.

Coude 360°

Pour une position optimale du tuyau et faciliter la mobilité, le coude tourne à 360°

Support de harnais actif

La mobilité du support de harnais permet de suivre les mouvements du patient sans modifier l'étanchéité au niveau du coussin de gel.



L3 Médical

8, rue de la Pierre Millière - 38070 Saint Quentin Fallavier - France
Tél.: +33 (0)474 825 727 - Fax.: +33 (0)474 827 938 - contact@l3medical.com
www.l3medical.fr



L3 Médical

"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions"



Ascend™ Nasal

Masque Nasal à coussin de gel amovible

Désassemblage : pincer simplement les côtés du coussin pour le libérer de la coque.



Assemblage : placer l'ergot supérieur dans l'encoche puis pousser les ergots inférieurs jusqu'à ce que ceux-ci s'insèrent dans les encoches.

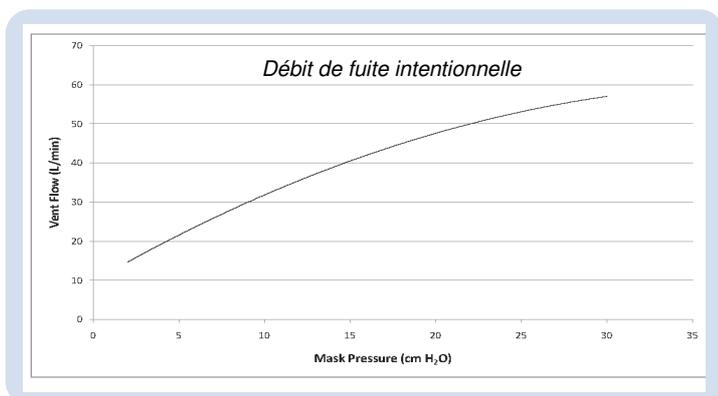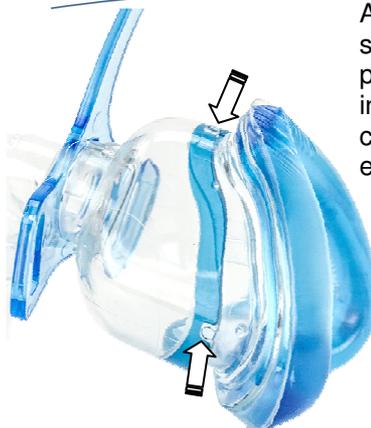

Composition du masque

Coque	PVC
Gel du coussin	Silicone qualité médicale
Enveloppe du gel	Film polyuréthane
Coude pivotant	Polycarbonate
Harnais	Breathoprène® avec SILVERtec™

Référence	Désignation	Taille	Poids (grammes)	Espace mort (ml)
50179	Kit masque avec coussins + harnais	S, M, L	NA	NA
50201	Coussin gel amovible	S	58	83
50202	Coussin gel amovible	M	59	88
50203	Coussin gel amovible	L	63	96
55051	Harnais EZ Fit	Unique	NA	NA

Résistance à 50l/min = 0,24 cmH₂O - à 100l/min = 0,87 cmH₂O

Température d'utilisation : ne pas exposer le masque à des températures dépassant 60°C (140°F).

Ascend™

Coussin de gel amovible

Egalement disponible en version bucco nasal



L3 Médical

8, rue de la Pierre Millière - 38070 Saint Quentin Fallavier – France

Tél.: +33 (0)474 825 727 - Fax.: +33 (0)474 827 938 - contact@l3medical.com

www.l3medical.fr